

Anleitung zur Probenentnahme

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Gültigkeit Ihrer Probe oder des Ergebnisses beeinträchtigen.

Wir empfehlen, die Analyse erst durchzuführen, wenn die Schwangerschaft mindestens 7 Wochen erreicht hat, gerechnet ab dem ersten Tag Ihrer letzten Menstruation (49 Tage).

Vor der erforderlichen Blutentnahme ist kein Nüchternsein notwendig.

Hinweis: Blutproben der Mutter müssen von einer qualifizierten Fachperson, z. B. einem Arzt oder einer Krankenschwester, entnommen werden. Mundschleimhautabstriche des Vaters können von den Testteilnehmern selbst zu Hause entnommen werden.

Vorsichtsmaßnahmen (BITTE SORGFÄLTIG BEACHTEN)

- **Kontaktieren Sie vor Ihrem Termin unser Kundenservice-Team, um sicherzustellen**, dass Sie einen passenden Abholzeitpunkt für die Blutproben vereinbaren können. Wir empfehlen dringend, die Proben noch am selben Tag zu versenden, an dem die Blutproben entnommen wurden.
- Wir empfehlen, die Blutentnahme so früh wie möglich am Tag durchführen zu lassen. Verwenden Sie zum Versand der Blutproben ausschließlich den mitgelieferten Kurierbeutel.
- Verwenden Sie keine anderen Blutentnahmeröhrchen als die in unserem Kit enthaltenen.
- Stellen Sie sicher, dass die korrekte Blutmenge entnommen wird.
- Die Entnahme der Probe des Vaters kann zu Hause gemäß den bereitgestellten Anweisungen erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass das Proben-Einsendeformular vollständig ausgefüllt ist und alle erforderlichen Angaben enthalten sind.

In Ihrem Probenentnahme-Kit finden Sie Folgendes:

1 × Einwilligungserklärung	1 × Anleitung zur Kurierabholung
1 × Anleitung zur Probenentnahme	1 × Rücksende-Kurierbeutel
1 × Umschlag für Tupfer	1 × Sicherheitssiegel
6 × Tupfer	1 × Biohazard-Beutel
2 × saugfähige Pads	1 × Röhrcheneinsatz
2 × 10-ml-Blutentnahmeröhrchen	

Anleitung zur Probenentnahme

Anleitung zur Entnahme von DNA-Blutproben:

Für den pränatalen Vaterschaftstest benötigen wir Blutproben der Mutter, die von einem Arzt, einer Krankenschwester oder einem Phlebotomisten entnommen werden müssen, um sicherzustellen, dass der Vorgang korrekt durchgeführt wird.

Die Entnahme der Probe(n) des/der Vaters muss mit den im Kit enthaltenen Mundabstrichen erfolgen. Die Entnahme kann zu Hause durchgeführt werden, sofern die bereitgestellten Anweisungen sorgfältig befolgt werden (siehe nächste Seite).

Vorgehensweise zur Blutprobenentnahme (Mutter)

- Vereinbaren Sie einen Termin mit einer qualifizierten Person zur Entnahme der Blutproben. Bringen Sie zu diesem Termin unbedingt Ihr Probenentnahme-Kit mit.
- Das Blut der Mutter muss in beide im Kit enthaltenen **10-ml-Röhrchen** entnommen werden – eines für die Analyse und eines als Reserveprobe. Stellen Sie sicher, dass beide Röhrchen deutlich und vollständig mit allen erforderlichen Angaben beschriftet sind.
- Füllen Sie die Einwilligungsformulare sorgfältig vor oder während Ihres Termins aus.
- Nach der Entnahme und Beschriftung sollte der Arzt oder die Krankenschwester jedes Röhrchen vorsichtig von Hand kippen, um sicherzustellen, dass Blut, Antikoagulans und Stabilisator vollständig vermischt sind. Legen Sie anschließend beide Röhrchen zurück in den Röhrcheneinsatz und platzieren Sie die saugfähigen Pads darüber.
- **Beide Röhrchen müssen vollständig gefüllt sein.** Das zweite Röhrchen dient als Reserve, falls die Hauptprobe fehlschlägt oder beschädigt wird

Vorgehensweise zur Entnahme der Mundprobe (Vater)

- Essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen Sie mindestens eine Stunde vor der Entnahme der Mundabstrichproben nicht.
- Füllen Sie alle Angaben auf dem Tupferumschlag sowie auf dem Probenentnahmeformular vollständig aus, einschließlich der erforderlichen Unterschriften.
- Öffnen Sie die Papierverpackung und entnehmen Sie alle sechs Tupfer. Fassen Sie jeden Tupfer ausschließlich am Ende ohne Schaumstoff an.
- Entnehmen Sie Wangenzellen, indem Sie die Schaumstoffspitze etwa eine Minute lang fest an der Innenseite der rechten Wange entlangrollen und dabei die gesamte innere Wangenfläche abdecken.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit drei Tupfern an der rechten Wange.
- Wiederholen Sie anschließend denselben Vorgang an der linken Wange mit den verbleibenden drei Tupfern. Alle sechs Tupfer müssen eingesendet werden.
- Lassen Sie die Tupfer eine Stunde lang an der Luft trocknen, wobei die Schaumstoffenden nach oben zeigen. Achten Sie darauf, dass die Tupfer keine Oberflächen berühren.
- Legen Sie die getrockneten Tupfer direkt in den Tupferumschlag. **Legen Sie sie nicht zurück in die Originalverpackung.**

Anleitung zur Probenentnahme – Rücksendung Ihrer Proben

- Legen Sie den Röhrcheneinsatz mit den Blutentnahmeröhrchen und Absorptionskissen in den Biohazard-Beutel.
- Legen Sie den Biohazard-Beutel anschließend in den mitgelieferten weiß-blauen Karton.
- Denken Sie daran, den Umschlag mit den Tupfern des Vaters und der Einverständniserklärung beizulegen. Diese dürfen nicht zusammen mit den Blutproben in den Biohazard-Beutel gelegt werden. Sobald alles verpackt ist, verschließen Sie den Karton mit dem mitgelieferten Sicherheitssiegel.
- Legen Sie den verschlossenen weiß-blauen Karton in den mitgelieferten Versandbeutel. Notieren Sie sich die Sendungsnummer und verschließen Sie den Beutel.
- Übermäßige Hitze kann die Proben unbrauchbar machen. Stellen Sie daher sicher, dass die Proben bei Raumtemperatur gelagert werden.
- Achten Sie darauf, den Versandbeutel ordnungsgemäß zu verschließen. Unsachgemäßes Verschließen kann zu Probenverlust während des Transports führen und eine erneute Probenentnahme erforderlich machen.
- Sobald die Proben versandt wurden, kontaktieren Sie uns bitte zur Bestätigung des Versands. Geben Sie in Ihrer Nachricht immer Ihre Fallreferenznummer an.